

<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>	<b>FT-085</b>
<b>DESINFETANTE BAC-CIDE QUATERNÁRIO DE AMONIA 11%</b>	<b>Folha 01 Emissão: 21/07/2023</b>

## 1. CARACTERÍSTICAS E FINALIDADE

O BAC-CIDE é um desinfetante a base de Quaternários de Amônia de 5ª geração, indicado para limpeza e desinfecção em um único procedimento, de superfícies fixas, artigos não críticos e materiais de inaloterapia e assistência respiratória em estabelecimentos de assistência à saúde. Portanto, recomendado para artigos; equipamentos como monitores em LCD, incubadoras, bombas de infusão, transdutores, respiradores e outros; superfícies, como pisos, azulejos, mesas, bancadas, paredes e mobílias, revestimentos em vinil, emborrachados, PVC ou linóleo, porcelanatos, vidros ou acrílicos, látex, aço inox, alumínio, cobre, ferro e latão, plásticos como PET, PVC, PP e polietileno. Eficácia comprovada contra: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomona aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Candida albicans*, *Mycobacterium smegmatis* e *Mycobacterium bovis*. FÓRMULA SEM CORANTE E SEM ÁLCOOL. NÃO IRRITANTE PARA OLHOS, MUCOSAS E PELE.

Nome Químico: Desinfetante Quaternário de Amônia 11%.

## 2. PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES

### Química

Princípio Ativo: Cloreto de Benzalcônico

Teor do Ativo: 11%

Composição: Cloreto de Benzalcônico, Antioxidante, Sequestrante, Tensoativos e Água.

### Física

pH (100%): 7,0-9,0

Densidade: 0,99-1,01 g/mL

Estado Físico: Líquido límpido

Coloração: Incolor

## 3. EPI's NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO

Luva de borracha, avental e óculos de segurança.

## 4. MODO DE USO

Deve ser usado na diluição única de 1% (10ml de produto completando com água para 1 litro de solução). Atenção: Ao preparar a solução, use sempre recipientes limpos sem resíduo de qualquer outro agente químico. Não adicione sabões à solução de BAC-CIDE, pois seu princípio ativo é neutralizado por alguns deles. Para desinfecção de superfícies fixas (pisos, paredes): Aplicar a solução diluída com panos, mops ou esponjas. Deixar em contato durante 10 minutos. Remover o excesso com panos limpos. Não enxaguar. BAC-CIDE possui em sua fórmula um tensoativo compatível que já proporciona um adequado poder de limpeza. Para desinfecção de artigos não críticos: Lavar previamente, enxaguar e secar os artigos. Imergir os artigos no produto diluído, deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

## **5. EMBALAGEM**

Embalagem de 5L, 20L, 50L

## **6.PRAZO DE VALIDADE**

24 Meses

## **7.ADVERTÊNCIA**

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Atendimento Toxicológico CEATOX 0800 722 6001.

**Produto Registrado na Anvisa/MS Nº 25351.464041/2023-76**  
**Autorização de Funcionamento MS: MS 3.11399-9**